


# LUPY ZABIEGOWE TYPU FLIP-UP

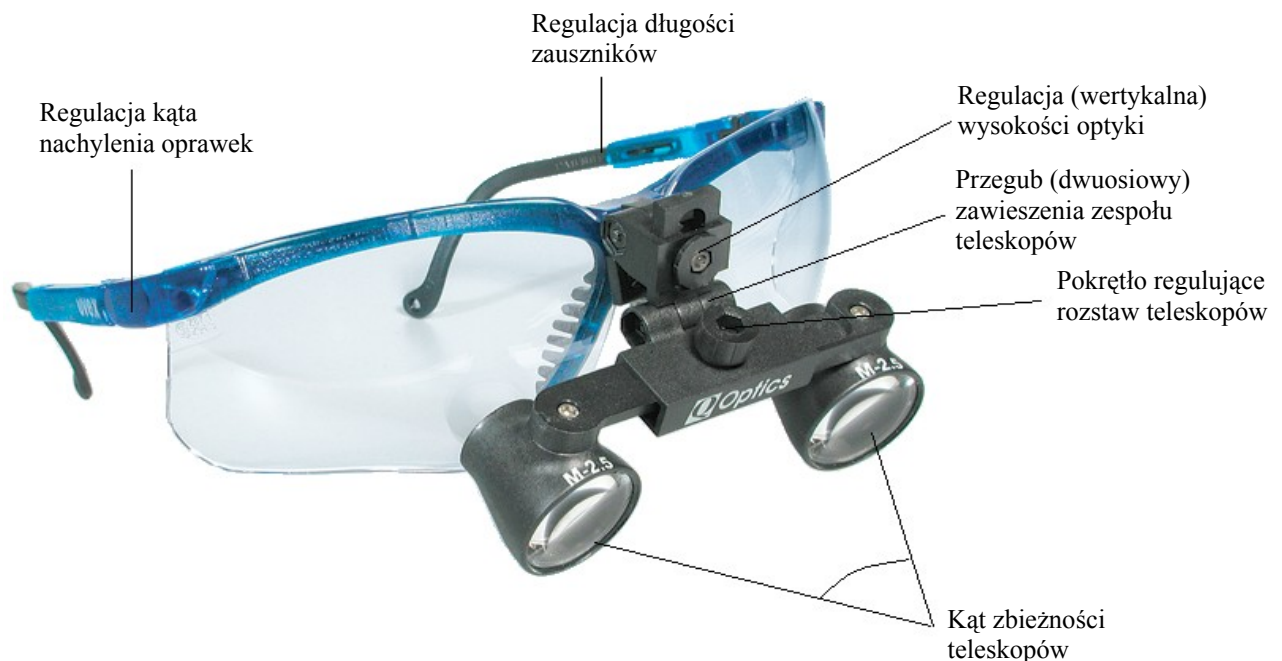

Teleskopy należy dostosować do rozstawu źrenic za pomocą centralnie umieszczonego pokrętła (patrz rysunek).

W tym celu należy (obserwując pole zabiegowe) rozszerzyć pokrętłem maksymalnie rozstaw lup i powoli go zmniejszać, aż do uzyskania jednolitego obrazu w kształcie okręgu. Według potrzeby rozszerzyć minimalnie rozstaw lup do uzyskania obrazu w kształcie elipsy.

Jest to jedyna regulacja, którą musi wykonać każdy użytkownik lup, pozostałe zmieniają ustawienia fabryczne i umożliwiają dostosowanie lup do indywidualnego sposobu pracy lub budowy anatomicznej.



Źle



Dobrze

Po wykonaniu czynności opisanych powyżej można upewnić się, czy fabryczne nastawy kąta zbieżności nie stwarzają dyskomfortu pracy w lupach. W tym celu należy zamknąć lewe oko. Prawe oko powinno rejestrować w polu widzenia nie zdeformowany obraz okręgu.

Należy powtórzyć procedurę dla drugiego oka.



Źle



Źle



Dobrze

W przypadku korzystania przez użytkownika z okularów korekcyjnych lub do czytania niezbędnym jest zamontowanie odpowiednich szkieł w oprawkach (wg. wskazań okulisty).

Należy sprawdzić wizualnie (np. w lusterku), czy oprawki okularów zostały umiejscowione równoległe do linii łączącej źrenice. Jeżeli występują różnice należy zwrócić się do optyka, aby dokonał korekty zauszników.

W oprawkach firmy UVEX zastosowanych w lupach Q-OPTICS można indywidualnie wyregulować długość zauszników i kąt nachylenia oprawek.

## Uwagi końcowe

- Dyskomfort pierwszych dni pracy w lupach jest sprawą naturalną. Prosimy się nie zrażać pamiętając, że wzrok będzie musiał przywyknąć do innego obrazu pola zabiegowego. W związku z tym zaleca się stopniowe wydłużanie czasu pracy w lupach. Pierwszego dnia nie powinien on przekraczać 20 minut. W miarę indywidualnych możliwości należy go systematycznie wydłużać.**
- Lupy stomatologiczne są wodoodporne, można myć pod bieżącą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.

3. Dezynfekcję można przeprowadzać używając preparatów w sprayu na bazie mieszanin fenol-alkohol według instrukcji producenta preparatu. Używanie żrących chemikaliów, glutaraldehydu, jodoformu i innych metod dezynfekcji grozi uszkodzeniem lup.